

(IAPC) INSÉMINATION ARTIFICIELLE POST-CERVICALE



Scan for Video!

QUESTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉES

EST-CE NÉCESSAIRE DE NETTOYER LA VULVE?

Oui, il est fortement recommandé de nettoyer la vulve avant la saillie pour réduire le risque d'introduire des corps étrangers dans le col de l'utérus et l'utérus.

LA STIMULATION CERVICALE EST-ELLE IMPORTANTE?

La recherche suggère que la stimulation cervicale après l'IAPC améliore le nombre de nés totaux et nés vivants.

POURQUOI Y A-T-IL UNE ATTENTE MINIMUM DE 40 MINUTES ENTRE LA VÉRIFICATION DES CHALEURS ET LE MOMENT DE L'INSÉMINATION?


Lorsque les truies sont stimulées par le verrat, elles démontrent le réflexe d'immobilité. L'un des résultats de ce réflexe est la contraction du col de l'utérus, rendant le passage de la canule interne à travers le col utérin très difficile à traverser. Attendre au moins 40 minutes permet aux truies de se détendre. L'attente facilite le passage de la canule interne et permet au processus d'aller beaucoup plus rapidement.

Y A-T-IL UNE LIMITE DE TEMPS POUR SAILLIR LES FEMELLES SUIVANT LA VÉRIFICATION DES CHALEURS?

Une fois que les truies ont montré le réflexe d'immobilité, elles deviennent réfractaires et ne présenteront pas de chaleur pendant un certain temps. Il est préférable de saillir pendant la période réfractaire qui peut durer jusqu'à deux heures.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'IAPC:

- Ne laissez pas la sonde toucher le sol ou quoi que ce soit d'insalubre pendant que les femelles attendent d'être inséminées.
- Utilisez une nouvelle sonde pour chaque femelle inséminée afin d'éviter toute infection.
- Remplacer le soufflet sur l'applicateur tous les autres jours.
- Attendez au moins 40 minutes après la vérification des chaleurs avant d'inséminer et ainsi s'assurer que le col de l'utérus est détendu.

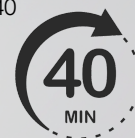

QUEL MATÉRIEL EST NÉCESSAIRE POUR ENTREPRENDRE L'IAPC?

- Matériel pour nettoyer la vulve de la femelle avant l'insémination
- Gel lubrifiant pour appliquer sur l'extrémité de la sonde pour chaque femelle inséminée
- Doses de semence à température de préservation (15-17° Celsius)



QUI PUIS-JE CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATION SUR L'IAPC ET DE LA FORMATION?

- Votre représentant commercial DNA Genetics
- Le Directeur des Services Techniques de DNA Genetics
 - Dr John Sonderman
 - 402-564-0407 EXT. 396
 - jsonderman@dnaswinegenetics.com
- Des visites sur place peuvent être organisées par un représentant qualifié de DNA Genetics
- Contactez-nous aujourd'hui pour davantage de ressources, d'informations, et pour commencer avec l'IAPC dans votre système!